

PROLUX All in One

Sensitive

HR

PROLUX All in One Sensitive

VIŠENAMJENSKA OTOPINA ZA OSJETLJIVE OČI ZA SVE VRSTE MEKIH KONTAKTNIH LEĆA

uključujući leće od silikonskog hidrogela nove generacije

MEDICINSKI PROIZVOD

SADRŽI NATRIJEV HIJALURONAT

PROLUX All in One Sensitive posebno je formulirana kako bi osigurala udobno nošenje kontaktnih leća i najosjetljivijim korisnicima.

SASTAV

Natrijev hijaluronat, poloksamer, EDTA, poliheksanid 0,0001% u puferiranoj, izotoničnoj i sterilnoj otopini.

NAMJENA

Čisti i uklanja proteine, dezinficira, čuva, ispire, vlaži i podmazuje.

UPUTE ZA UPORABU

1. Prije rukovanja lećama temeljito operite ruke vodom i sapunom.
2. Izvadite leću iz oka i držeći je na dlanu, ukapajte nekoliko kapi višenamjenske otopine te pažljivo trljajte obje strane leće nekoliko sekundi.
3. Isperite leću otopinom PROLUX All in One Sensitive s obje strane.
4. Odložite svaku leću u zaseban odjeljak spremnika za leće i napunite otopinom tako da potpuno prekrije leće.
5. Ostavite leće u otopini najmanje 4 sata (ili tijekom noći) kako biste osigurali potpunu dezinfekciju.

6. Nakon postupka dezinfekcije, leće možete odmah staviti u oko ili najprije isprati PROLUX All in One Sensitive otopinom.
7. Održavajte spremnik za leće čistim. Zamijenite otopinu svaki dan. Nemojte čistiti spremnik za leće vodom iz slavine.

UPOZORENJA

- Nakon uporabe čvrsto zatvorite bočicu.
- Nemojte koristiti proizvod ukoliko sigurnosni zatvarač nedostaje ili je oštećen.
- Nemojte dodirivati ili zaprljati kapaljku kako biste izbjegli kontaminaciju.
- Leće možete čuvati u zatvorenoj kutijici do 30 dana.
- Nakon svake primjene bacite otopinu iz kutijice za leće.
- Nikada nemojte ispirati spremnik za leće vodom iz slavine.
- Nemojte gutati otopinu.
- Prije korištenja lijekova za oko obavijestite liječnika da nosite leće.
- U slučaju iritacije obratite se specijalistu oftalmologu.
- Nemojte koristiti proizvod u slučaju poznate preosjetljivosti ili alergije na bilo koji sastojak proizvoda.
- Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.
- Upotrijebiti u roku od 90 dana nakon prvog otvaranja.

UVJETI ČUVANJA

- Držati izvan pogleda i dohvata djece.
- Čuvati na sobnoj temperaturi.

PAKIRANJE

1 kutija sadrži 350 ml otopine u bočici.

1 kutija sadrži 100 ml otopine u bočici.

1 kutija sadrži 60 ml otopine u bočici.

Proizvođač

AVIZOR S.A., La cañada 13-17, 28850 Torrejón de Ardoz Madrid, Španjolska

Distributer za RH

Proximum d.o.o., Vodnikova 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Datum posljednje izmjene: studeni 2009.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU



Proizvođač



Serijski broj



Rok valjanosti



Sterilizirano
aseptičnim metodama



CE oznaka



Pročitati uputu za uporabu

PROLUX[®] All in One

Sensitive

SI

PROLUX[®] All in One

Sensitive

VEČNAMENSKA RAZTOPINA ZA OBČUTLJIVE OČI ZA VSE VRSTE MEHKIH KONTAKTNIH LEČ

vključno s silikonsko hidrogelnimi lečami nove generacije

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

VSEBUJE NATRIJEV HIALURONAT

PROLUX[®] All in One Sensitive je posebej zasnovan za udobno nošenje kontaktnih leč tudi za najbolj občutljive uporabnike.

SESTAVA

Natrijev hialuronat, poloksamer, EDTA, poliheksanid 0,0001% v pufrski, izotonični in sterilni raztopini.

NAMEN

Čisti in odstranjuje beljakovine, razkuži, varuje, izpira, vlaži in maže.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred rokovanjem z lečami si temeljito umijte roke z milom in vodo.
2. Odstranite lečo iz očesa in jo držite na dlani, nakapajte nekaj kapljic večnamenske raztopine in nekaj sekund previdno drgnite po obeh straneh leče.
3. Lečo na obeh straneh sperite z raztopino PROLUX[®] All in One Sensitive.
4. Vsako lečo položite v ločen predel posodice za leče in jo napolnite z raztopino, da popolnoma pokrije leče.
5. Pustite leče v raztopini vsaj 4 ure (ali čez noč), da zagotovite popolno dezinfekcijo.

6. Po postopku dezinfekcije lahko leče takoj vstavite v oko ali jih najprej sperete z raztopino PROLUX[®] All in One Sensitive.
7. Posodico za leče vzdružite čisto. Vsak dan zamenjajte raztopino. Posodice za leče ne čistite z vodo iz pipe.

OPOZORILA

- Plastenko po uporabi dobro zaprite.
- Izdelka ne uporabljajte, če varnostni pokrovček manjka ali je poškodovan.
- Ne dotikajte se in ne umažite kapanke, da preprečite kontaminacijo.
- Leče lahko hranite v zaprti škatli do 30 dni.
- Po vsaki uporabi raztopino zavržite iz posode za leče.
- Posodice za leče nikoli ne izpirajte z vodo iz pipe.
- Ne pogoltnite raztopine.
- Pred uporabo zdravil za oko obvestite zdravnika, da nosite kontaktne leče.
- V primeru draženja se posvetujte s specialistom oftalmologom.
- Izdelka ne uporabljajte v primeru znane preobčutljivosti ali alergije na katerokoli sestavino izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
- Po prvem odprtju porabite v 90 dneh.

POGOJI SHRANJEVANJA

- Shranjevati nedosegljivo otrokom!
- Hraniti pri sobni temperaturi.

PAKIRANJE

1 škatla vsebuje 350 ml raztopine v plastenki.

1 škatla vsebuje 100 ml raztopine v plastenki.

1 škatla vsebuje 60 ml raztopine v plastenki.

Proizvodač

AVIZOR S.A., La cañada 13-17. 28850 Torrejón de Ardoz Madrid, Španjolska

Distributer za Slovenijo

PROKSIMUM PHARMA d.o.o.

Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

Datum zadnje revizije navodila: november 2009.

POMEN SIMBOLOV NA IZDELKU



Proizvajalec



Številka serije



Uporabno do



Sterilizirano z
aseptičnimi metodami



CE oznaka



Glejte navodila za uporabo