

PROLUXX EdeDay

HR

PROLUXX EdeDay
KAPI ZA OKO
HIPERTONIČNA STERILNA OTOPINA

MEDICINSKI PROIZVOD
Bez konzervansa

PROČITAJTE UPUTU PRIJE UPORABE. SAČUVA-
JTE OVU UPUTU. MOŽDA ĆETE JE TREBATI
PONOVNO PROČITATI.

OPIS PROIZVODA

PROLUXX Ededay je medicinski proizvod koji pruža privremeno ublažavanje simptoma edema rožnice. Zahvaljujući inovativnoj formulaciji, PROLUXX Ededay ima mukoadhe-
zivna svojstva, što znači bolje prianjanje na površinu oka čime se osigurava vlaženje i zaštita oka.

SASTAV

Natrijev hijaluronat, borna kiselina, kolifor P407, trometamol, sorbitol, pročišćena voda.

NAMJENA

PROLUXX Ededay je hipertonična, sterilna otopina za oko bez konzervansa namijenjena za privremeno ublažavanje simptoma edema rožnice kao što su promjene vida i bol. PROLUXX Ededay ima veću osmolarnost od suzne tekućine: razlika u osmolarnosti potrebna je za reapsorpciju edematozne tekućine. PROLUXX Ededay povećava osmolar-
nost površine rožnice čime se izvlači voda iz slojeva rožnice.

PROLUXX Ededay sadrži natrijev hijaluronat koji stvara zaštitni sloj na površini rožnice te pruža zaštitu i vlaženje. Natrijev hijaluronat čini primjenu PROLUXX Ededay udobnijom zbog svojstava podmazivanja i mehaničke zaštite koji smanjuju osjećaj pečenja i iritacije karakterističnih pri primjeni hipertoničnih kapi za oko.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

- Dobro operite ruke prije primjene PROLUXX Ededay.
- Zabacite glavu malo prema natrag i povucite donju vjeđu prema dolje kako biste stvorili džep između vjeđe i oka.
- Držite bočicu okomito prema oku i usmjerite pogled prema plavom vrhu bočice.
- Lagano pritisnite bočicu da istisnete jednu kap u oko. Ponovite postupak na drugom oku.
- Pazite da vrh bočice ne dodiruje vaše oko ili prste.
- Nakon primjene bočicu dobro zatvorite.
- Ukapajte jednu ili dvije kapi u svako oko svaka tri do četiri sata ili prema preporuci liječnika.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Nemojte koristiti PROLUXX Ededay u slučaju poznate preosjetljivosti ili alergije na bilo koji sastojak proizvoda.
- U slučaju iritacije oka, prestanite koristiti PROLUXX Ededay i obratite se liječniku za savjet.
- Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno.
- Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti.
- Upotrijebite u roku od 8 tjedana nakon prvog otvaranja.
- Nemojte gutati proizvod.
- Pazite da prilikom primjene vrh bočice ne dodiruje vaše oko ili prste.
- Nemojte dijeliti PROLUXX Ededay s drugim osobama.
- U rijetkim slučajevima, neposredno nakon primjene PROLUXX Ededay može doći do prolaznog zamućenja vida zbog viskoznosti otopine. Pričekajte nekoliko minuta prije nego krenete obavljati aktivnosti koje zahtijevaju jasan vid.
- Prije primjene PROLUXX Ededay uklonite kontaktne leće da se površina leće ne bi oštetila. Pričekajte najmanje trideset minuta prije nego ponovno stavite leće.
- Ako koristite bilo koje druge kapi ili mast za oči, primijenite ih u razmaku od najmanje trideset minuta.
- Proizvod je uobičajeno namijenjen za neprekidnu upotrebu tijekom najdulje sedam uzastopnih dana. Ako se vaši simptomi ne poboljšaju, obratite se liječniku za savjet.

TRUDNOĆA I DOJENJE

Ako ste trudni ili dojite savjetujte se s liječni-
kom prije primjene PROLUXX Ededay kapi za oko.

UVJETI ČUVANJA

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi između 9 i 25 °C.

PAKIRANJE

1 kutija sadrži 10 ml hipertonične, sterilne otopine za oko u bočici.

Proizvođač:

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Milano, Italija

Distributer za RH:

Proximum d.o.o.
Vodnikova 5, 1 000 Zagreb
Hrvatska

Datum posljednje izmjene: lipanj 2019.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU

	Proizvođač		CE oznaka
	Serijski broj		Pročitati uputu za uporabu
	Rok valjanosti		Odložiti u smeće
	Temperaturne granice		Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno
	Sterilizirano zračenjem		Medicinski proizvod

PROLUXX EdeDay

SI

PROLUXX EdeDay KAPLJICE ZA OKO HIPERTONIČNA RAZTOPINA

MEDICINSKI PRIPOMOČEK
Brez konzervansov

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA.
NAVODILA SHRANITE. MORDA JIH BOSTE
MORALI PONOVRNO PREBRATI.

OPIS IZDELKA

PROLUXX EdeDay je medicinski pripomoček, ki pomaga zagotoviti začasno olajšanje simptomov edema roženice. Zahvaljujoč svoji inovativni formulaciji ima PROLUXX EdeDay mukoadhezivne lastnosti: omogoča boljši oprijem na očesno površino, kar zagotavlja vlaženje in zaščito očesa.

SESTAVA

Natrijev hialuronat, borova kislina, kolifor P407, trometamol, sorbitol, prečiščena voda.

NAMEN UPORABE

PROLUXX EdeDay je hipertonična sterilna raztopina za oko brez konzervansov, indicirana za začasno lajšanje simptomov edema roženice, kot sta sprememba vida in bolečina. PROLUXX EdeDay ima višjo osmolarnost kot solzna tekočina: ta razlika v osmolarnosti je potrebna za reabsorpcijo edematozne tekočine. Nanos PROLUXX EdeDay zagotavlja površini roženice povečano osmolarnost, ki pritegne vodo iz plasti roženice. Natrijev hialuronat, ki ga vsebuje PROLUXX EdeDay, tvori zaščitno pregrado na očesu, ki zagotavlja zaščito in vlaženje. Natrijev hialuronat omogoča prijetnejšo uporabo PROLUXX EdeDay zaradi svojih mazalnih in mehanskih zaščitnih lastnosti, ki zmanjšujejo značilen pekoč občutek in draženje hipertoničnih raztopin.

ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE

- Pred uporabo PROLUXX EdeDay si dobro umijte roke.
- Nagnite glavo nekoliko nazaj in povlecite spodnjo veko očesa navzdol, da oblikujete žep.
- Plastenko držite navpično nad očesom in glejte proti modri konici plastenke.
- Nežno pritisnite stekleničko, da vkapate eno kapljico v oko. Postopek ponovite na drugem očesu.
- Pazite, da se konica plastenke ne dotika vaših oči ali prstov.
- Po uporabi dobro zaprite pokrovček.
- Vkapajte eno ali dve kapljici v vsako oko, vsake tri ali štiri ure ali po navodilih zdravnika.

OPOZORILA

- Ne uporabljajte PROLUXX EdeDay v primeru znane preobčutljivosti ali alergije na katero koli sestavino.
- V primeru draženja oči prenehajte uporabljati PROLUXX EdeDay in se posvetujte z zdravnikom.
- Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.
- Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
- Uporabite v 8 tednih po prvem odprtju.
- Ne zaužijte.
- Hraniti izven dosega otrok!
- Pazite, da se konica plastenke ne dotika očesa ali prstov.
- PROLUXX EdeDay ne delite z nikomer.
- V redkih primerih se lahko po uporabi PROLUXX EdeDay pojavi začasen zamegljen vid zaradi viskoznosti raztopine. Počakajte nekaj minut, preden začnete s kakršno koli dejavnostjo, ki zahteva jasen vid.
- Odstranite kontaktne leče pred uporabo PROLUXX EdeDay, saj drugače lahko prizadeta površina kontaktnih leč. Počakajte vsaj trideset minut, preden jih ponovno vstavite.
- Če uporabljate katere koli druge kapljice za oko ali mazila, naj bo vsaj trideset minut razmika med aplikacijama.
- Izdelek je običajno namenjen neprekinjeni uporabi največ sedem zaporednih dni; če se vaši simptomi ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.

NOSEČNOST IN DOJENJE

Če ste noseči ali dojite, se pred uporabo PROLUXX EdeDay kapljic za oko posvetujte z zdravnikom.

POGOJI SHRANJEVANJA

Shranjujte izven dosega in pogleda otrok! Shranjujte pri temperaturi od 9 - 25 °C, na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne toplote.

VSEBINA PAKIRANJA

1 škatlica vsebuje 10 ml hipertonične, sterilne raztopine za oko v plastenki.

Proizvajalec:

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Milano, Italija

Distributer za SI

PROKSIMUM PHARMA d.o.o.
Pot k sejmišču 26A
1231 Ljubljana – Črnuče

Datum zadnje spremembe: junij 2019.

RAZLAGA SIMBOLOV NA PAKIRANJU

	Proizvajalec
	Številka serije
	Rok uporabnosti
	Omejitev temperature
	Sterilizirano s sevanjem

	CE oznaka
	Glejte navodila za uporabo
	Odvrzite v smeti
	Prepovedana uporaba, če je ovojnina poškodovana
	Medicinski pripomoček