

PROLUXX OzoSept

HR

PROLUXX OzoSept

KAPI ZA OKO

ZAŠTITNA I PODMAZUJUĆA OTOPINA
ZA ODRASLE I DJECU

MEDICINSKI PROIZVOD

PROČITAJTE UPUTU PRIJE UPORABE.
SAČUVAJTE OVU UPUTU. MOŽDA ĆETE JE
TREBATI PONOVRNO PROČITATI.

OPIS PROIZVODA

PROLUXX OzoSept je otopina za površinu oka koja štiti, podmazuje, vlaži i umiruje. Sadrži LipozonEye® (ozonirano biljno ulje, sojine fosfolipide) i hipromelozu te je korisna za:

- Zaštitu prije i poslije operacije oka.
- Ublažavanje simptoma povezanih s upalom, uključivo i infektivnog podrijetla.
- Poticanje procesa obnove nakon traumatskog ili kirurškog stresa i kod ublažavanja simptoma suhog oka, uključujući iritaciju uzrokovanu uvjetima iz okoline ili mehaničkim stresom, kao što je nošenje kontaktnih leća.

Zahvaljujući ozoniranom ulju i liposomima, PROLUXX OzoSept smanjuje sposobnost bakterija da stvore biofilm i potiče njihovu razgradnju. Biofilm je prirodni obrambeni mehanizam koji stvaraju bakterije, a može se stvoriti (formirati) na površini oka, osobito u slučaju abrazije i traume, ili na kontaktnim lećama.

Uklanjanjem biofilma stvara se nepovoljno okruženje za širenje bakterija, što ih čini osjetljivijima na prirodne zaštitne mehanizme oka i na antibiotike, što smanjuje simptome upale uzrokovane bakterijama.

Biljno ulje i liposomi podržavaju stabilizaciju lipidnog sloja suznog filma smanjujući

isparavanje vodenog sloja i osiguravajući trenutno olakšanje za oči.

Biljno ulje koje se koristi je ozonirano i stoga samozaštitno, biorasploživije i biopodnošljivo umetanjem u liposome.

SASTAV

LipozonEye® (ozonirano ulje suncokretovih sjemenki, sojini fosfolipidi) hidroksipropil metilceluloza, borna kiselina, natrijev tetraborat, natrijev edetat, poliheksanid (PHMB), pročišćena voda.

NAMJENA

PROLUXX OzoSept je namijenjen kao potpora:

- Kao dio profilakse prije i nakon kirurškog zahvata (npr. katarakte, intravitrealnih injekcija itd.); naročito se preporučuje primjena tri dana prije kirurškog zahvata.
- Kod upalnih bolesti rožnice (keratitis) i konjunktive (konjunktivitis), uključujući bolesti infektivnog podrijetla (uzrokovane bakterijama, virusima, gljivicama).
- Kod liječenja antibioticima, u odraslih i djece.
- U slučaju abrazija, trauma rožnice, primjene kontaktnih leća.
- U slučaju promjena na površini oka zbog nestabilnosti suznog filma, također prisutnih u bolesnika s rekurentnim infekcijama oka.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

- Prije primjene protresite bočicu. Ukapajte jednu ili dvije kapi u svako oko, jednom ili više puta na dan ili prema preporuci liječnika.
- Proizvod se smije upotrebljavati za vrijeme nošenja kontaktnih leća.

PROLUX X OzoSept

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Temeljito operite ruke prije primjene.
- Pazite na to da vrh bočice ne dospije u dodir s okom.
- Nakon svake primjene čvrsto zatvorite bočicu.
- Primijenite proizvod u razmaku od najmanje 5 minuta prije ili nakon primjene drugih proizvoda za lokalnu primjenu na oko.
- Neznatna varijacija u opalescenciji otopine za oko ne odražava promjenu kvalitete proizvoda.
- Nemojte upotrebljavati proizvod ako pakiranje nije netaknuto.
- Nemojte upotrebljavati proizvod nakon 28 dana od otvaranja.
- Proizvod se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici.
- Nemojte gutati.

- Nemojte koristiti proizvod u slučaju alergije ili poznate preosjetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda.
- U slučaju nuspojava, prekinite s primjenom i posavjetujte se s liječnikom.

UVJETI ČUVANJA

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati proizvod na temperaturi od 8 do 25 °C.

PAKIRANJE

1 kutija sadrži 8 ml otopine za oko u bočici.

Proizvođač:

FB Vision S.p.A.

Via San Giovanni Scafa

63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Italija

Distributer za RH:

PROXIMUM d.o.o.

Vodnikovica 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Rev. 01/2021

OBJAŠNENJE SIMBOLA NA PROIZVODU

	Proizvođač		CE oznaka
	Serijski broj		Pročitati uputu za uporabu
	Rok valjanosti		Odložiti u smeće
	Temperатурne granice		Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno
	Sterilizirano aseptičnim metodama		Medicinski proizvod
	Ambalaža se može reciklirati		